

Tabla de cocción VITA OMEGA 900

Cocción	Vt °C	→ mín.	↗ mín.	↗ °C / mín.	Temp. aprox. °C	→ mín.	VAC mín.
Cocción de óxido		¡Obsérvense las indicaciones de los fabricantes de las aleaciones!					
Cocción Wash Polvo	600	2.00	4.00	75	900	2.00	4.00
Cocción Wash Pasta	500	6.00	6.00	67	900	3.00	6.00
Masa básica Polvo	600	2.00	4.00	75	900	1.00	4.00
Masa básica Pasta	500	6.00	6.00	67	900	2.00	6.00
Cocción de masa de hombros con cocción de la dentina MARGIN	600	6.00	6.00	50	900	2.00	6.00
Cocción de dentina	600	6.00	6.00	50	900	1.00	6.00
Cocción de 1ª corrección	600	6.00	6.00	48	890	1.00	6.00
Cocción de 2ª corrección	600	6.00	6.00	48	890	1.00	6.00
Cocción de corrección con COR	600	4.00	6.00	33	800	1.00	6.00
Cocción de glaseado con masa de glaseado Akz 25	600	4.00	4.00	75	900	1.00	—
Cocción de glaseado	600	—	4.00	75	900	2.00	—
Cocción de glaseado con Akzent Fluid	600	4.00	4.00	75	900	2.00	—